

报告类别： 示范实验室数据报告



质控品名： 病原体血清学多项非定值质控品II

REF 819J-D	6x3.5mL	EXP 2026-02-24	LOT 2309A819JD	更新日期： 2024-01
				1 / 2

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(HBcAb)乙肝核心抗体	(HBeAb)乙肝e抗体	(HBsAb)乙肝表面抗体

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 819J-D	6x3.5mL	EXP 2026-02-24	LOT 2309A819JD	更新日期： 2024-01 2 / 2
-------------------	---------	-----------------------	-----------------------	------------------------

批号： 2309A819JD				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(HBcAb)乙肝核心抗体				
YHLO iFlash Analyzer YHL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	Sample/Cu toff	0.86	0.68-1.04	
(HBeAb)乙肝e抗体				
YHLO iFlash Analyzer YHL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	Sample/Cu toff	0.73	0.59-0.87	
(HBsAb)乙肝表面抗体				
YHLO iFlash Analyzer YHL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	43.7	34.7-52.7	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。