

Unassayed Coagulation Factors Control



【预期用途】：

【摘要及原理】：

【组成成份】：

【儲存條件及效期】：

2℃~8℃	可稳定保存至效期结束。
-------	-------------

2℃~8℃	可稳定保存72小时。
-------	------------

【适用仪器】：

【使用方法】：

6. 将取出的样品，室温静置15~20分钟，上机检测。

1.已取样出的样本不得倒回原瓶中。

3.若发现包装破损,请及时联系售后服务商。

【限制】：

2.使用中若发现有微生物污染或浊度过高，切勿使用。

4. 丢弃本产品时，请务必按照当地废

所有用于生产本产品的人源物质均使用国家食品药品监督管理局总局批准的方法进行了检验,乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、丙型肝炎(HCV)抗体和HIV1/HIV2抗体均呈阴性。本品可能含有其他尚无合适检测方法的安全性病原体。按照良好实验室规范的要求,所有人源物质均应视为具有潜在感染性,并采用与患者样本相同的防范措施进行处理。

【参考文献】：

2. Westgard JO. Internal quality control: planning and implementation strategies. *Ann Clin Biochem.* 2003;593-611.

【企业信息】：

注册人/生产企业名称：上海惠中生物科技有限公司

联系方式: 86-21-58547250/58990629

北部、四层

售后服务单位名称: 上海昆涑生物科技有限公司


电话: 021-55969126

【说明书核准及修改日期】：

核准日期：2021年06月11日

【说明书版本号】：

VD5.1

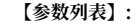

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
血浆凝血酶原时间(PT)	PT国际标准化比值(PT INR)	活化部分凝血活酶时间(APTT)
纤维蛋白原(FIB)	凝血酶时间(TT)	纤维蛋白(原)降解产物(FDP)
D-二聚体(DDU)(D-D(DDU))	D-二聚体(FEU)(D-D(FEU))	抗凝血酶III(AT-III)
二因子(F II)	五因子(F V)	七因子(F VII)
八因子(F VIII)	九因子(F IX)	十因子(F X)
十二因子(F XII)	十一因子(F XI)	蛋白S(Protein S)
蛋白C(Protein C)	纤溶酶原 (Plasminogen)	

示范实验室数据/ Peer Group Data: <http://www.china-qlab.com/sfsj.html>

注：示范实验室数据是若干实验室的汇总数据，仅供学习、参考之用。根据具良好实验室规范的要求，实验室需遵循相关技术规范确定自己的均值和可接受范围。

