

血液学八参数非定值质控品

Unassayed Hematology CBC-8 Control

REF 货号 / Cat : 660-1;660-2;660-3

规格 / Qty : 6 × 2mL

【预期用途】：
本产品为非定值质控品，用于监测和控制临床实验室检测方法的精密度。

【摘要及原理】：
非定值质控品主要用于客观评估临床实验室检测方法的精密度，是实验室全面质量管理中不可缺少的一部分。

【组成成份】：
本产品以全血为基础，添加了高纯度生物提取物、化学品、稳定剂等，其性状为冷藏液态。

【储存条件及效期】：
未开瓶

2℃～8℃	可稳定保存至效期结束。
-------	-------------

开瓶后

2℃～8℃	可稳定保存14天。
-------	-----------

于冷藏或室温条件下运输本产品。严禁冷冻。

【适用仪器】：
本产品适用于检测参数列表所列项目的仪器设备。白细胞分类参数仅适用于部分检测方法学检测。

【使用方法】：
应将本产品视为患者样本，检测时参照所使用的仪器、配件或试剂的说明进行操作。

1. 复温：从冰箱中取出质控品，于室温静置10~15分钟。
2. 混匀（整个过程切勿震荡）：

2.1 滚动混匀：双手掌心相对，质控品瓶盖向上，将质控品竖直向上夹于掌心。来回搓动双手，让质控品在双手间竖直滚动。持续20~30秒。颠倒质控品，让瓶盖向下，重复上述滚动预混匀步骤。

2.2 颠倒混匀：手握质控品瓶盖，轻柔连续颠倒混匀20~30秒。
3. 取样前，竖直向上静置质控品10秒。
4. 取样检测：

4.a 手动取样：小心打开瓶盖，让吸样针在距离瓶底2-5mm处 吸样。完成后迅速撤回质控品，用无污染的吸水纸擦拭瓶盖内 侧和瓶口螺纹处。然后盖上瓶盖，放回2℃~8℃保存。

4.b 自动进样：按照仪器要求操作自动进样。质控样本退出后，用无污染的吸水纸擦拭穿刺点，放回2℃ ~8℃保存。

- 注意：
- 1.已取出的样本不得倒回原瓶中。
- 2.操作中请注意预防微生物污染。
- 3.若发现包装破损，请及时联系售后服务商。



REF	LOT					
产品货号	产品批号	产品效期	避光保存	警告，查阅随附文件	制造商	温度条件

【参数列表】：

参数（Parameters）	参数（Parameters）	参数（Parameters）
白细胞(WBC)	红细胞(RBC)	血小板(PLT)
血细胞比容/压积(HCT)	平均红细胞体积(MCV)	平均红细胞血红蛋白含量(MCH)
平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)	血红蛋白(HGB/ Hb)	

示范实验室数据/ Peer Group Data: <http://www.china-qlab.com/sfsj.html>

注：示范实验室数据是若干实验室的汇总数据，仅供学习、参考之用。根据良好实验室规范的要求，实验室需遵循相关技术规范确定自己的均值和可接受范围。



【参考文献】：

- 1.CLSI. Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions; Approved Guideline—Third Edition. CLSI document C24-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2006.
2. Westgard JO. Internal quality control: planning and implementation strategies. Ann Clin Biochem. 2003;593 -611.

【企业信息】：

生产企业名称：上海惠中生物科技有限公司
住所：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢3层、4层，3幢1层、2层、4层
联系方式： 86-21-58547250/58990629
生产地址：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号3幢一层、二层北部、四层
生产许可证编号：沪药监械生产许20120954号
售后服务单位名称：上海昆涑生物科技有限公司
电话：021-55969126

【说明书核准及修改日期】：

核准日期：2024年01月29日

【说明书版本号】：

V7.0

