



|     |       |       |     |            |     |         |       |         |
|-----|-------|-------|-----|------------|-----|---------|-------|---------|
| REF | 673-2 | 6×1mL | EXP | 2026-06-07 | LOT | 40341C8 | 更新日期: | 2023-12 |
|     |       |       |     |            |     |         |       | 1 / 3   |

本报告含以下项目的示范实验室数据

| 参数 (Parameters)       | 参数 (Parameters)    | 参数 (Parameters)       |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| (APTT)活化部分凝血活酶时间      | (AT-III)抗凝血酶III    | (D-D(DDU)) D-二聚体(DDU) |
| (D-D(FEU)) D-二聚体(FEU) | (F II)二因子          | (F IX)九因子             |
| (F V)五因子              | (F VII)七因子         | (F VIII)八因子           |
| (F X)十因子              | (F XI)十一因子         | (F XII)十二因子           |
| (FIB)纤维蛋白原            | (Plasminogen )纤溶酶原 | (Protein C)蛋白C        |
| (Protein S)蛋白S        | (PT INR)PT国际标准化比值  | (PT)血浆凝血酶原时间          |
| (TT)凝血酶时间             |                    |                       |

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

|       |       |       |     |            |     |         |       |         |
|-------|-------|-------|-----|------------|-----|---------|-------|---------|
| REF   | 673-2 | 6×1mL | EXP | 2026-06-07 | LOT | 40341C8 | 更新日期： | 2023-12 |
| 2 / 3 |       |       |     |            |     |         |       |         |

|                                                                            |         |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| 批号：40341C8                                                                 |         |       |             |
| 项目\仪器\试剂方法                                                                 | 单位      | 均值    | + / - 2 SD  |
| (APTT)活化部分凝血活酶时间                                                           |         |       |             |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens Dade Actin FS(APTT) \ Light scattering | Seconds | 60.4  | 46-74.8     |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens Dade Actin(APTT) \ Light scattering    | Seconds | 76.5  | 58.3-94.7   |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens Pathrombin SL(APTT) \ Light scattering | Seconds | 81.6  | 62.2-101    |
| Werfen ACL series<br>Werfen \ Light scattering                             | Seconds | 53.4  | 40.7-66.1   |
| Stago STA series<br>Stago \ Magnetic Beads                                 | Seconds | 56.4  | 43-69.8     |
| (AT-III)抗凝血酶III                                                            |         |       |             |
| Werfen ACL series<br>Werfen \ Nephelometry                                 | %       | 36.3  | 27.7-44.9   |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Nephelometry                         | %       | 38.3  | 29.2-47.4   |
| (D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)                                                      |         |       |             |
| Werfen ACL series<br>Werfen \ Nephelometry                                 | mg/L    | 0.907 | 0.691-1.12  |
| (D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)                                                      |         |       |             |
| Stago STA series<br>Stago \ Latex agglutination (LA)                       | mg/L    | 1.74  | 1.32-2.16   |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Nephelometry                         | mg/L    | 3.38  | 2.57-4.19   |
| (F II)二因子                                                                  |         |       |             |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering                     | IU/mL   | 0.18  | 0.139-0.221 |
| (F IX)九因子                                                                  |         |       |             |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering                     | IU/mL   | 0.14  | 0.106-0.174 |
| (F V)五因子                                                                   |         |       |             |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering                     | IU/mL   | 0.43  | 0.327-0.533 |
| (F VII)七因子                                                                 |         |       |             |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering                     | IU/mL   | 0.2   | 0.154-0.246 |
| (F VIII)八因子                                                                |         |       |             |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering                     | IU/mL   | 0.45  | 0.342-0.558 |
| (F X)十因子                                                                   |         |       |             |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering                     | IU/mL   | 0.232 | 0.177-0.287 |
| (F XI)十一因子                                                                 |         |       |             |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering                     | IU/mL   | 0.27  | 0.205-0.335 |
| (F XII)十二因子                                                                |         |       |             |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering                     | IU/mL   | 0.41  | 0.314-0.506 |
| (FIB)纤维蛋白原                                                                 |         |       |             |
| Werfen ACL series<br>Werfen \ Light scattering                             | g/L     | 1.86  | 1.42-2.3    |
| Stago STA series<br>Stago \ Magnetic Beads                                 | g/L     | 2.12  | 1.61-2.63   |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering                     | g/L     | 1.92  | 1.46-2.38   |
| (Plasminogen )纤溶酶原                                                         |         |       |             |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering                     | IU/mL   | 0.46  | 0.352-0.568 |
| (Protein C)蛋白C                                                             |         |       |             |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering                     | IU/mL   | 0.463 | 0.353-0.573 |
| (Protein S)蛋白S                                                             |         |       |             |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering                     | IU/mL   | 0.34  | 0.258-0.422 |
| (PT INR)PT国际标准化比值                                                          |         |       |             |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Calculate                            | INR     | 2.62  | 2-3.24      |
| Werfen ACL series<br>Werfen \ Calculate                                    | INR     | 2.72  | 2.07-3.37   |
| Stago STA series<br>Stago \ Calculate                                      | INR     | 3.08  | 2.35-3.81   |

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。



|       |       |       |     |            |     |         |       |         |
|-------|-------|-------|-----|------------|-----|---------|-------|---------|
| REF   | 673-2 | 6×1mL | EXP | 2026-06-07 | LOT | 40341C8 | 更新日期： | 2023-12 |
| 3 / 3 |       |       |     |            |     |         |       |         |

|                            |         |      |           |
|----------------------------|---------|------|-----------|
| (PT)血浆凝血酶原时间               |         |      |           |
| Werfen ACL series          | Seconds | 33.8 | 25.7-41.9 |
| Werfen \ Light scattering  |         |      |           |
| Stago STA series           | Seconds | 31.3 | 23.8-38.8 |
| Stago \ Magnetic Beads     |         |      |           |
| Sysmex CA 1500/6000/7000   | Seconds | 29   | 22.1-35.9 |
| Siemens \ Light scattering |         |      |           |
| (TT)凝血酶时间                  |         |      |           |
| Sysmex CS 5100             | Seconds | 16.2 | 12.6-19.8 |
| Siemens \ Light scattering |         |      |           |

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。