



REF	581-2	6×5mL	EXP	2025-11-30	LOT	376DFE4	更新日期：	2023-02
1 / 4								

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(a-HBDH)α-羟丁酸脱氢酶	(Alb)白蛋白	(ALP)碱性磷酸酶
(ALT/ SGPT)丙氨酸氨基转移酶	(AMY)淀粉酶	(Apo-A I)载脂蛋白A I
(Apo-B)载脂蛋白B	(AST/ SGOT)天门冬氨酸氨基转移酶	(Ca)钙
(CHE)胆碱酯酶	(CHOL/ TC)总胆固醇	(CK)肌酸激酶
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)	(Cl)氯	(CO2 (HCO3-))二氧化碳 (碳酸氢根)
(Cr)肌酐	(DBIL)直接胆红素	(Fe)铁
(GGT)L-γ-谷氨酰基转移酶	(GLU)葡萄糖	(HDL-C)高密度脂蛋白胆固醇
(K)钾	(LA)乳酸	(LDH)乳酸脱氢酶
(LDL-C)低密度脂蛋白胆固醇	(LIP)脂肪酶	(Mg)镁
(Na)钠	(NEFA)游离脂肪酸	(P)磷
(PRO/ TP)(总) 蛋白	(TBA)总胆汁酸	(TBIL)总胆红素
(TG)甘油三酯	(TRF)转铁蛋白	(UA)尿酸
(UIBC)不饱和铁结合力	(Urea)尿素	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	581-2	6×5mL	EXP	2025-11-30	LOT	376DFE4	更新日期： 2023-02
							2 / 4

批号：376DFE4			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(a-HBDH)α-羟丁酸脱氢酶			
Beckman AU series MedicalSystem \ immunoturbidimetric	U/L	474	379-569
(Alb)白蛋白			
Beckman AU series MedicalSystem \ Bromocresol green	μmol/L	679	543-815
Beckman AU series MedicalSystem \ Bromocresol green	g/L	44.8	35.8-53.8
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	μmol/L	727	582-872
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	g/L	48	38.4-57.6
(ALP)碱性磷酸酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Rate -AMP buffer	U/L	465	372-558
Beckman AU series MedicalSystem \ Rate -AMP buffer	U/L	541	433-649
(ALT/ SGPT)丙氨酸氨基转移酶			
Beckman AU series MedicalSystem \ UV with P5P	U/L	193	154-232
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ UV with P5P	U/L	182	146-218
(AMY)淀粉酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ PNP-G7	U/L	357	286-428
Beckman AU series MedicalSystem \ PNP-G7	U/L	386	309-463
(Apo-A I)载脂蛋白A I			
Roche cobas 4000/6000/8000 SekiSui \ immunoturbidimetric	g/L	1.8	1.44-2.16
(Apo-B)载脂蛋白B			
Roche cobas 4000/6000/8000 SekiSui \ immunoturbidimetric	g/L	0.998	0.798-1.2
(AST/ SGOT)天门冬氨酸氨基转移酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ UV with P5P	U/L	231	185-277
Beckman AU series MedicalSystem \ UV with P5P	U/L	245	196-294
(Ca)钙			
Beckman AU series MedicalSystem \ BAPTA	mmol/L	2.9	2.32-3.48
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ BAPTA	mmol/L	2.71	2.17-3.25
(CHE)胆碱酯酶			
Beckman AU series MedicalSystem \ DTNB	U/L	8020	6410-9620
(CHOL/ TC)总胆固醇			
Beckman AU series MedicalSystem \ Cholesterol oxidase	mmol/L	5.59	4.47-6.71
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Cholesterol oxidase	mmol/L	5.27	4.22-6.32
(CK)肌酸激酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Rate -AMP buffer	U/L	699	559-839
Beckman AU series MedicalSystem \ Rate -AMP buffer	U/L	665	532-798
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)			
Beckman AU series BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	U/L	66	52.8-79.2
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immune suppression	U/L	58.1	46.5-69.7
(Cl)氯			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	107	85.6-128
Beckman AU series MedicalSystem \ ISE (indirect)	mmol/L	108	86.4-130
(CO2 (HCO3-))二氧化碳 (碳酸氢根)			
Beckman AU series BIOSINO \ PEPC	mmol/L	10.9	8.72-13.1
(Cr)肌酐			
Beckman AU series MedicalSystem \ Enzymatic	μmol/L	446	357-535
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	μmol/L	488	390-586

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	581-2	6×5mL	EXP	2025-11-30	LOT	376DFE4	更新日期：	2023-02
								3 / 4

(DBIL)直接胆红素				
Roche cobas 4000/6000/8000				
Roche \ Diazotization -Blank Compensation	μmol/L	49		39.2-58.8
Beckman AU series				
MedicalSystem \ Diazotization -Blank Compensation	μmol/L	43.9		35.1-52.7
(Fe)铁				
Beckman AU series				
MedicalSystem \ Ferrozine colorimetry	μmol/L	25.3		20.2-30.4
Roche cobas 4000/6000/8000				
Roche \ Ferrozine colorimetry	μmol/L	30.8		24.6-37
(GGT)L-γ-谷氨酰基转移酶				
Roche cobas 4000/6000/8000				
Roche \ γ-glutamyl -3-carboxy-4-nitroaniline	U/L	204		163-245
Beckman AU series				
MedicalSystem \ γ-glutamyl -4-nitroaniline	U/L	172		138-206
(GLU)葡萄糖				
Beckman AU series				
MedicalSystem \ Hexokinase	mmol/L	15.3		12.2-18.4
Roche cobas E601/602				
Roche \ Hexokinase	mmol/L	15.6		12.5-18.7
(HDL-C)高密度脂蛋白胆固醇				
Roche cobas 4000/6000/8000				
Roche \ Enzymatic	mmol/L	1.06		0.847-1.27
Beckman AU series				
MedicalSystem \ Enzymatic	mmol/L	1.78		1.42-2.14
(K)钾				
Roche cobas 4000/6000/8000				
Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	7.1		5.68-8.52
Beckman AU series				
MedicalSystem \ ISE (indirect)	mmol/L	7		5.6-8.4
(LA)乳酸				
Beckman AU series				
MedicalSystem \ Lactate to pyruvate (L-P)	mmol/L	6.51		5.21-7.81
Roche cobas E601/602				
Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)	mmol/L	8.87		7.1-10.6
(LDH)乳酸脱氢酶				
Roche cobas 4000/6000/8000				
Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)	U/L	476		381-571
Beckman AU series				
MedicalSystem \ Lactate to pyruvate (L-P)	U/L	481		385-577
(LDL-C)低密度脂蛋白胆固醇				
Beckman AU series				
MedicalSystem \ Enzymatic	mmol/L	3.2		2.56-3.84
Roche cobas 4000/6000/8000				
Roche \ Enzymatic	mmol/L	2.94		2.35-3.53
(LIP)脂肪酶				
Roche cobas E601/602				
Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	U/L	40.2		32.2-48.2
Beckman AU series				
MedicalSystem \ Enzymatic Cycling Assays Method	U/L	30		24-36
(Mg)镁				
Beckman AU series				
MedicalSystem \ Xylidyl Blue	mmol/L	1.4		1.12-1.68
Roche cobas 4000/6000/8000				
Roche \ Xylidyl Blue	mmol/L	1.4		1.12-1.68
(Na)钠				
Beckman AU series				
MedicalSystem \ ISE (indirect)	mmol/L	147		118-176
Roche cobas 4000/6000/8000				
Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	150		120-180
(NEFA)游离脂肪酸				
Roche cobas E601/602				
Roche \ ACS - ACOD	mmol/L	1.06		0.848-1.27
(P)磷				
Roche cobas 4000/6000/8000				
Roche \ Phosphomolybdate UV-rate	mmol/L	2.82		2.26-3.38
Beckman AU series				
MedicalSystem \ Phosphomolybdate UV-rate	mmol/L	2.74		2.2-3.28
(PRO/ TP)(总) 蛋白				
Beckman AU series				
MedicalSystem \ Biuret-endpoint	g/L	68.4		54.7-82.1
Roche cobas E601/602				
Roche \ Biuret-endpoint	g/L	70.9		56.7-85.1
(TBA)总胆汁酸				
Roche cobas E601/602				
Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	65.2		52.2-78.2
Beckman AU series				
MedicalSystem \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	74.5		59.6-89.4

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。



REF	581-2	6×5mL	EXP	2025-11-30	LOT	376DFE4	更新日期：	2023-02
4 / 4								

(TBIL)总胆红素			
Beckman AU series	μmol/L	137	110-164
MedicalSystem \ Diazotization			
Roche cobas 4000/6000/8000	μmol/L	120	96-144
Roche \ Diazotization			
(TG)甘油三酯			
Roche cobas 4000/6000/8000	mmol/L	2.11	1.69-2.53
Roche \ GPO-POD			
Beckman AU series	mmol/L	2.1	1.68-2.52
MedicalSystem \ Free glycerol removed			
(TRF)转铁蛋白			
Roche cobas E601/602	mg/dL	298	238-358
Roche \ Immunonephelometry (INA)			
(UA)尿酸			
Roche cobas 4000/6000/8000	μmol/L	475	380-570
Roche \ Uricase colorimetry			
Beckman AU series	μmol/L	496	397-595
MedicalSystem \ Uricase colorimetry			
(UIBC)不饱和铁结合力			
Roche cobas E601/602	μmol/L	29.9	23.9-35.9
Roche \ Ferrozine colorimetry			
(Urea)尿素			
Beckman AU series	mmol/L	19.7	15.8-23.6
MedicalSystem \ Urease colorimetry			
Roche cobas 4000/6000/8000	mmol/L	18.9	15.1-22.7
Roche \ Urease colorimetry			

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。